



# SSLABO模型 Sピン

使用手順参考例

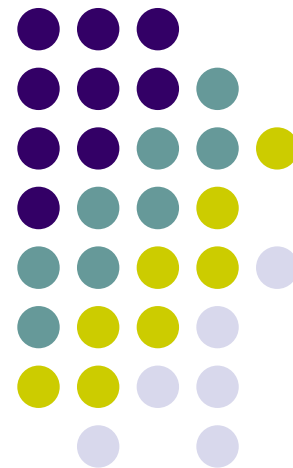

# Sピン(シングル)タイプ 接着剤使用例

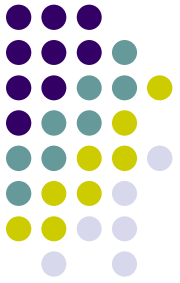

## ステップ1

### 石膏模型の前処理



1-1

支台歯側の石膏模型を使用する基台に合うよう、トリマーで unnecessary 部分を取り除く。



1-2

エア等で模型の水分などを除去する。

★ポイント★  
水分を取り過ぎると接着石膏の接着力が弱くなるので、あまり取り過ぎないように注意する。

## ステップ2

### 石膏模型の貼付け



2-1

模型の貼り付け位置を決める。

★ポイント★  
基台のダルエルピンの位置と模型の分割する位置を考慮し、張り付ける位置を鉛筆などで印をしておくとうい。  
(模型の突起がピンの位置の目安になります。)



2-2

石膏模型の基底面に瞬間接着剤(K10、F28)を適量塗布し、鉛筆などで印をした位置決め場所に張り付ける。

★ポイント★  
はみ出した瞬間接着剤は専用の硬化促進剤(ラボクイックプライマー)を噴霧すれば次の作業にスムーズに移れます。



## ステップ3

### 石膏模型の切断



3-1

模型をSSLABO模型ミニソーで切断する。

★ポイント★  
**SSLABO模型(Sピン)専用カット台に移して切断する事をおすすめします。**  
局部用の場合は「取り外し台」を使用するとプラスチック台と石膏部分が楽に外せます。  
全歯列弓用の場合は口蓋部分を軽く叩くと外れます。  
石膏くずを歯ブラシ等で取り除くようにしておけば、浮き上がりは防止できます。



## ステップ4

4-1

模型を咬合器に装着する。

有限会社  
**齋藤歯研工業所**