

歯科材料 07 歯科用ワックス
歯科用ユーティリティワックス(一般医療機器) JMDNコード 70896000

スプルーワックス

【形状・構造及び原理等】

(1)成分: マイクロクリスタリンワックス、その他

(2)形状、寸法及び種類: 線状。断面は円形。

種類	直径(mm)	長さ(mm)
2.0	2.0	225
2.5	2.5	225
3.0	3.0	225
3.2	3.2	225
4.0	4.0	225
5.0	5.0	225
5.5	5.5	225
6.0	6.0	225
7.0	7.0	225
7.5	7.5	225
8.0	8.0	225
9.0	9.0	225
10.0	10.0	225

(3) 外観: 均一な赤色の棒状である。キズがない。

(4) 軟化: 加熱により均一に軟化する。

(5) 剥離: 室温において辺縁を薄く仕上げる場合、剥離しない。

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作成するために補助的に用いる。特に、注入、又はベントのスプルー用に適している

【使用方法等】

歯科技工の通法に従い、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び軟化して使用する。特に、アクリルレジン、ポリスルホンの注入又はベントのスプルー用に適している

【使用上の注意】

[その他の注意]

・本品は、可燃性であるので、使用の際、火気に気をつけること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ① 室温保管(冷暗所の場所)すること
- ② 本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所、車両内など)に放置しないこと。
- ③ 本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元 : (有) 齋藤歯研工業所
及び製造元
住 所 : 〒520-0524
滋賀県大津市和邇今宿 817-1
電話番号 : 077-594-0584
FAX番号 : 077-594-2669