

歯科材料 07 歯科用ワックス
歯科用ユーティリティワックス（一般医療機器）JMDNコード 70896000

コルペンワックス

【形状・構造及び原理等】

- (1)成分：マイクロクリスタリンワックス、その他
- (2)形状：線状
寸法：φ2.2×200mm
- (3)外観：均一な赤色の棒状である。キズがない。
- (4)軟化：加熱により均一に軟化する。
- (5)剥離：室温において辺縁を薄く仕上げる場合、剥離しない。

【使用目的又は効果】

歯科技工物を作成するために補助的に用いる。特に、床辺縁形成用に適している。

【使用方法等】

歯科技工の通法に従い、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び軟化して使用する。特に、床辺縁形成用に使用する。

【使用上の注意】

[その他の注意]

- ・本品は、可燃性であるので、使用の際、火気に気をつけること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ①室温保管（冷暗所の場所）すること。
- ②本品を高温となる場所（ストーブの側、直射日光の当たる場所、車両内など）に放置しないこと。
- ③本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売元：（有）齋藤歯研工業所
及び製造元
住 所：〒520-0524
滋賀県大津市和邇今宿 817-1
電話番号：077-594-0584
FAX番号：077-594-2669