

歯科材料 07 歯科用ワックス
歯科鑄造用シートワックス(一般医療機器) JMDNコード 70894000

ラインワックス

【形状・構造及び原理等】

(1)成分: マイクロクリスタリンワックス、その他

(2)形状、寸法及び種類:

線状。長さは20cm。断面はSR:円型
SH、SP:半円型、SL:楕円型、SOV:扁平

種類	直径(mm)	高さ(mm)
SR05	0.5	0.5
SR07	0.7	0.7
SR09	0.9	0.9
SR10	1.0	1.0
SR12	1.2	1.2
SR15	1.5	1.5
SR20	2.0	2.0
SR25	2.5	2.5
SR32	3.2	3.2
SR40	4.0	4.0
SR50	5.0	5.0
SR60	6.0	6.0
SH14	1.4	1.1
SH16	1.6	1.1
SH18	1.8	1.1
SH19	1.9	1.0
SH22	2.2	1.2
SH28	2.8	1.1
SP40	4.0	1.0
SP65	6.5	1.3
SL31	3.1	1.4
SL43	4.3	1.7
SOV50	5.0	2.0
SOV70	7.0	2.0

- (3) 外観: 均一な青色の棒状である。キズがない。
(4) 軟化: 加熱により均一に軟化する。
(5) 剥離: 室温において辺縁を薄く仕上げる場合、剥離しない。

【使用目的又は効果】

床、パー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製する為に用いる。

【使用方法等】

歯科技工の通法に従い、床、パー、クラスプ等の鑄造ろう型を作製する際に、本品を用途に応じて適量取り、屈折、圧接及び接着して使用する。

室温でご使用下さい。また、温水に浸漬してご使用いただければ、より複雑な原型も容易にできます。

【使用上の注意】

[その他の注意]

- ・本品は、可燃性であるので、使用の際、火気に気をつけること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・室温保管(冷暗所の場所)すること。
- ・本品を高温となる場所(ストーブの側、直射日光の当たる場所、車両内など)に放置しないこと。
- ・本品は、火気厳禁の場所に保管し、一つの保管庫に大量に保管しないこと。