

「SS LABO模型接着剤 A液」「SS LABO模型接着剤 B液」使用方法

ステップ1

1-1

臨床模型の石膏の粉をきれいに取り除く。

1-2

臨床模型をよく乾燥させて下さい。

ステップ2



2-1

「SS LABO模型接着剤 A液」を「SS LABO模型」と「臨床模型」に筆で塗布する。

※必ず両方に塗布すること！

(筆は付属していません)

★ポイント★

複数個同時に作業する場合は、10分以内に次の工程に移って下さい。
時間が過ぎてしまった場合は、もう一度塗布して下さい。
時間が過ぎると接着力・硬化速度が低下します。

ステップ3



3-1

「SS LABO模型接着剤 B液」を「臨床模型」に適量塗布する。



3-2

「SS LABO模型」に貼り付ける。
10秒以内に置くだけでなく圧着して下さい。

★ポイント★

接着面に、接着剤の厚みが無いようにして下さい。
(あらかじめ貼付位置に印をしておくとう作業がしやすいです。)

ステップ4



4-1

硬化後(1~2分)で切断できます。

■ 注意 ■

- ・「SS LABO模型接着剤 A液」は揮発性であるので、ふたを確実にしめること。
- ・「SS LABO模型接着剤 B液」は冷蔵保存すること。

ご使用前には、必ず注意書きをお読みください。

(有)齋藤歯研工業所