



SSLABO模型 Wピン

使用手順参考例

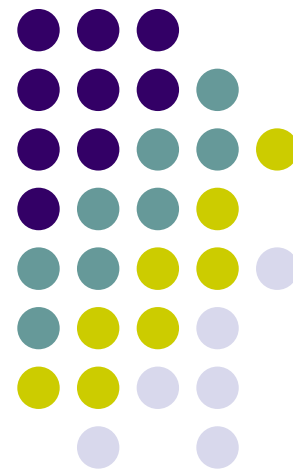

Wピンタイプ 接着剤使用例

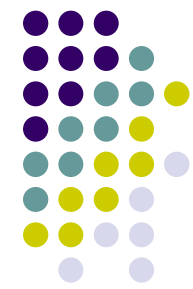

ステップ1

石膏模型の前処理



1-1

支台歯側の石膏模型を使用する基台に合うよう、トリマーで不必要な部分を取り除く。



1-2

エアー等で模型の水分などを除去する。
※しっかりと乾燥させる事

ステップ2

石膏模型の貼付け



2-1

模型の貼り付け位置を決める。

★ポイント★
基台のダルエルピンの位置と模型の分割する位置を考慮し、張り付ける位置を鉛筆などで印をしておくとうい。
(模型の突起がピンの位置の目安になります。)



2-2

石膏模型の基底面に瞬間接着剤(K10、F28)を適量塗布し、鉛筆などで印をした位置決め場所に張り付ける。

★ポイント★
はみ出した瞬間接着剤は専用の硬化促進剤(ラボウィックプライマー)を噴霧すれば次の作業にスムーズに移れます。



ステップ3

石膏模型の切断



3-1

模型をSSLABO模型ミニソーで切断する。

★ポイント★
石膏くずを歯ブラシ等で取り除くようにしておけば、浮き上がりは防止できます。



ステップ4

4-1

模型を咬合器に装着する。

有限会社
齋藤歯研工業所